


INSTALACION CON Y SIN ADAPTADORES

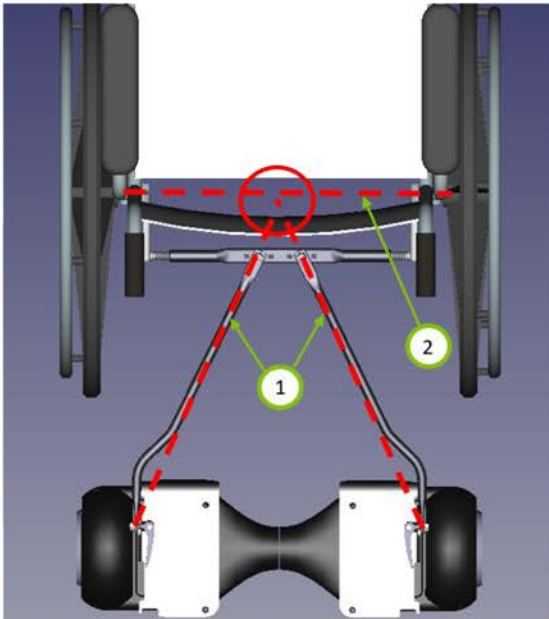

3.2.3 Situación de las barras de control con la barra central

Colocar las barras de control (1) de forma que su intersección coincida con la línea del eje de las ruedas de la silla de ruedas (2).


3.2.4 Unión de las barras de control con la barra central

Colocar el tornillo (7) con las arandelas (9) uniendo la barra de control (1) con la barra central (2).

Colocar la tuerca autoblocante (8).

3.2.5 Unión de la barra central con la silla de ruedas

Opción 1: **INSTALACION SIN ADAPTADORES** para sillas de ruedas con agujeros en las barras

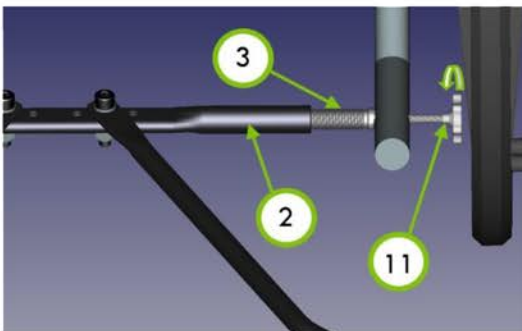


Colocar la barra central (2), enroscando las semibarras (3) en su interior hasta que coincida la longitud del conjunto con la distancia entre las barras con los agujeros de la silla de ruedas.

Pasar el maneral (11) a través del agujero de la barra de la silla de ruedas y enroscar en la semibarra (3).




Aspecto una vez montado


Opción 2: INSTALACION CON ADAPTADORES

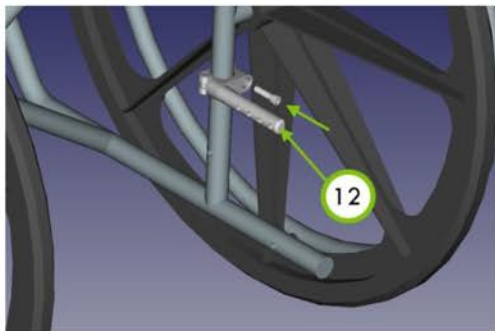

Situar la pieza de anclaje universal (12) en la barra vertical u horizontal de la silla de ruedas, apretando el tornillo allen.

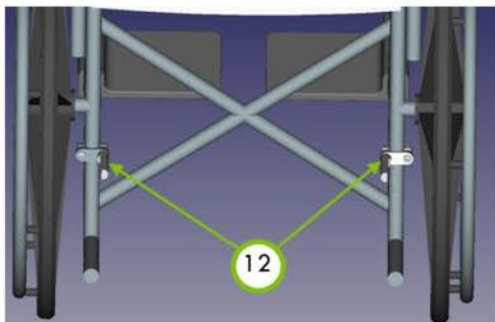

Situar la otra pieza de anclaje universal (12) a la misma altura en la barra contraria de la silla de ruedas.

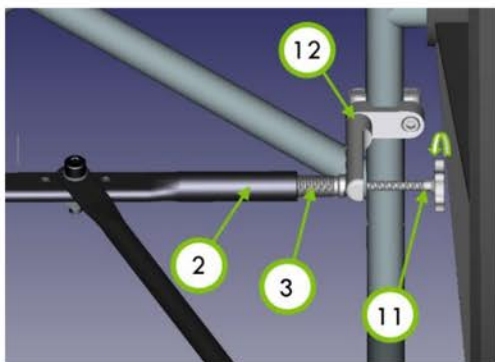

Colocar la barra central (2), enroscando las semibarras (3) en su interior hasta que coincida la longitud del conjunto con la distancia entre las piezas de anclaje universal (12)

Pasar el maneral (11) a través del agujero de la barra de la pieza de anclaje y enroscar en la semibarra (3).



Aspecto una vez montado